

## INSTRUCTIVO PARA TOMAR MOLDE EN YESO

### MATERIALES:

Nota: Los materiales de los ítems 1 y 2 se pueden comprar en una farmacia

<p><b>1. Venda yeso</b></p>	
<p><b>2. Manguera delgada o venoclisis</b></p>	
<p><b>3. Plástico de cocina</b></p>	
<p><b>4. Bisturí</b></p>	
<p><b>5. Cinta de enmascarar</b></p>	

## INSTRUCCIONES

1. Acostar al animal con la extremidad en posición anatómica.
2. Envolver la extremidad del animal con el plástico de cocina asegurándose de que se ajuste lo mejor posible.
3. Poner la manguera a lo largo de la extremidad recubierta por el plástico y asegurar con cinta de enmascarar.
4. Sumergir la cantidad de venda yeso a usar en un recipiente con agua, dejar por 5 segundos, retirar y escurrir el exceso de agua.
5. Usar la venda yeso para envolver la extremidad del animal de arriba hacia abajo asegurándose de que se encuentra en la posición más anatómicamente posible.
6. Dejar secar el yeso por aproximadamente 7 minutos, se va a calentar un poco durante el secado.
7. Usar un marcador para hacer una línea por encima de donde pasa la manguera.
8. Con el bisturí cortar el yeso por donde se marcó la línea sobre la manguera, halar la manguera ayuda a ir abriendo el yeso.
9. Retirar el molde de yeso y unir nuevamente los extremos cortados con la cinta de enmascarar.
10. Retirar la manguera y el plástico de cocina.

