

## **SISTEMAS DE MOVILIDAD ANIMAL**

### **Información general**

#### **SILLAS DE RUEDAS**

Animal Fix ha desarrollado sillas de ruedas que proporcionan movilidad y la capacidad para vivir una vida saludable y activa a los animales que sufren de algún tipo de discapacidad motora por causas como amputaciones, debilidad, incapacidad para usar las patas traseras o incapacidad para caminar.

Animal Fix garantiza las sillas de ruedas por defectos en materiales, componentes y manufactura por un período de seis (6) meses a partir de su entrega, a excepción del desgaste normal del arnés y las ruedas, las partes blandas (ruedas, correas, almohadillas, hebillas) tienen una garantía de 45 días. Esta garantía no se extiende a los daños causados por el animal o mal uso.

Los sillas de ruedas Animal Fix deben usarse según las recomendaciones e indicaciones de su médico veterinario, sin embargo, en algunas ocasiones se puede presentar la situación de que el animal no se adapte a la silla de ruedas ya sea debido a condiciones específicas o su temperamento, esta situación debe ser informada a la mayor brevedad por parte del propietario del animal y mediante registro fotográfico a Animal Fix, con esta información Animal Fix podrá dar algunos consejos al propietario y/o hacer algunos ajustes para mejorar la adaptación del animal a la silla de ruedas.

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

El uso de todos los sistemas de movilidad Animal Fix requiere de una fase de adaptación del animal, inicialmente se deben usar por periodos cortos de tiempo los cuales deben ir incrementando día a día según las indicaciones del médico veterinario.

**Comprometidos con el BIENESTAR ANIMAL**

Después de cada uso se debe examinar al animal para identificar si se presenta alguna irritación o daño en la piel, en caso de presentarse, se debe suspender el uso del producto por un día completo y después reanudar proceso de adaptación, es bastante común observar problemas de piel menores dentro de las primeras semanas.

Para reducir la posibilidad de problemas de piel, se debe procurar mantener, tanto los sistemas de movilidad Animal Fix como la piel del animal, bajo adecuadas condiciones de limpieza y siempre secos.

Siempre que se use alguno de los sistemas de movilidad Animal Fix se recomienda hacer algún tipo de refuerzo positivo con el animal, como darle un premio, de manera que se facilite el proceso de adaptación.